
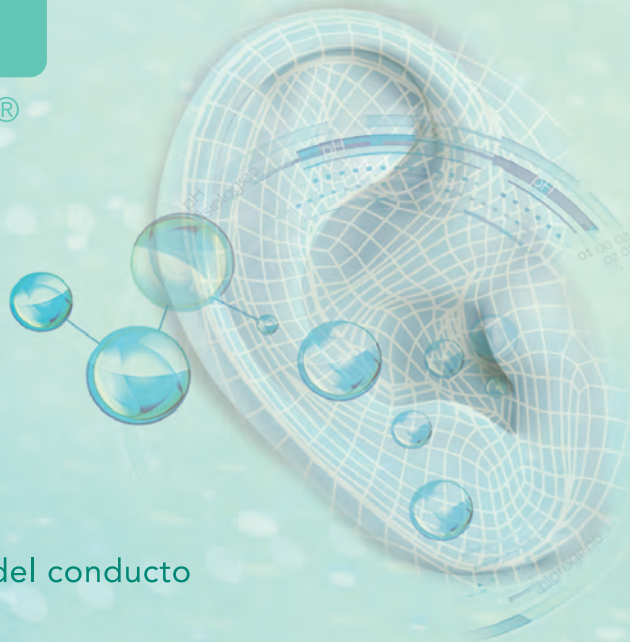


 **oti FAES**

TaponOX[®]

SPRAY ÓTICO

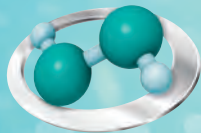


Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto
auditivo externo respetando el pH

Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto auditivo externo respetando el pH

oti FAES

TaponOX®

SPRAY ÓTICO

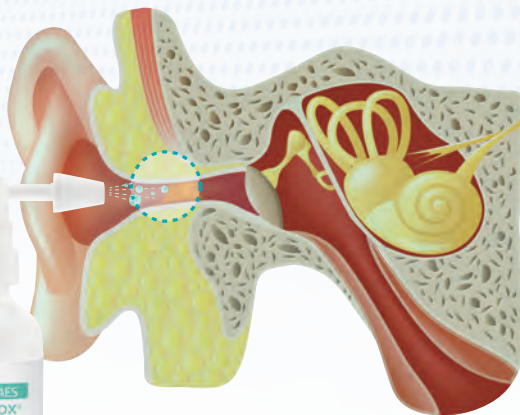



- **Rompe el tapón de cera** en pequeños fragmentos
- **Respecta el pH fisiológico** del conducto auditivo externo
- Crea **condiciones asépticas**, ayudando a **prevenir infecciones**

Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto auditivo externo respetando el pH

 **oti FAES**

TaponOX®

SPRAY ÓTICO

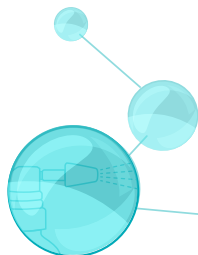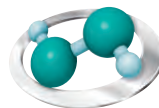

Spray ergonómico de manejo fácil y eficaz que permite administrar la **cantidad precisa**

Aplicar **4 o 5 pulverizaciones 3 veces al día** durante no menos de 3 días



Inclinar la cabeza y separar ligeramente el pabellón auricular hacia atrás



Aplicar y mantener 5 minutos la cabeza ligeramente inclinada



Girar la cabeza en sentido opuesto y secar el líquido



Limpiar con agua el aplicador, secarlo y guardarlo

 **FAES FARMA**

La **cera** es una secreción natural que protege el conducto auditivo externo. Sin embargo, se puede formar un tapón en el oído a causa de su **acumulación excesiva**. Los **síntomas** más frecuentes son dolor de oído, sensación de taponamiento, ruidos en el oído (tinnitus) o pérdida de audición parcial.

Recuerda que:



- No se aconseja limpiar los oídos con demasiada frecuencia o fuerza; la cera también ayuda a proteger el oído.
- Tratar los tapones de cera de forma errónea (bastoncillos, velas de oído...) puede provocar problemas como la otitis externa.



Oti Faes TaponOX® es un spray ótico de **uso domiciliario** que ayuda a la eliminación de los tapones de cera **respetando el pH** fisiológico del conducto auditivo externo y permite una administración fácil y eficaz:



1
Inclinar la cabeza y separar ligeramente el pabellón auricular hacia atrás



2
Aplicar y mantener 5 minutos la cabeza ligeramente inclinada



3
Girar la cabeza en sentido opuesto y secar el líquido




4
Limpiar con agua el aplicador, secarlo y guardarlo

Ayuda a eliminar el tapón de cera del conducto auditivo externo respetando el pH


oti FAES

TaponOX®

SPRAY ÓTICO

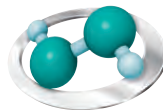

El spray ótico **Oti Faes TaponOX®** ayuda a la eliminación del tapón de cera del conducto auditivo externo gracias a la combinación del peróxido de hidrógeno y de un complejo estabilizante que contribuye al mantenimiento del pH adecuado

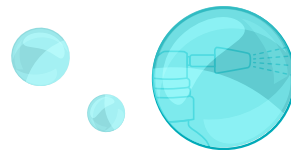

Aplicar **4 o 5 pulverizaciones**
3 veces al día durante
no menos de 3 días

www.faesfarma.com

FAES FARMA

TAP01118100001818